



**Spray nasale**  
con Carragelose®  
Senza conservanti.

## Istruzioni per l'uso di LONTAX PLUS

### LONTAX PLUS Spray nasale

#### Cos'è LONTAX PLUS?

LONTAX PLUS può essere usato come supporto per la profilassi e il trattamento delle sindromi simil-influenzali causate da virus. LONTAX PLUS può anche essere usato a scopo preventivo per idratare in modo prolungato le mucose nasali. Può essere usato negli adulti e nei bambini a partire da 1 anno di età.

LONTAX PLUS non contiene conservanti. Un filtro sterile garantisce la sterilità della soluzione anche dopo l'uso ripetuto. LONTAX PLUS non ha effetto decongestionante.

#### Cosa contiene LONTAX PLUS?

LONTAX PLUS è una soluzione viscosa limpida, incolore e inodore. 1 ml di soluzione contiene 1,2 mg di iota-carragenina (Carragelose®), 0,4 mg di kappa-carragenina, sodio cloruro e acqua depurata.

#### Quali sono le proprietà di LONTAX PLUS?

La bassa umidità e l'inquinamento dell'aria possono seccare la mucosa nasale. Il naso, però, è in grado di svolgere la propria funzione di filtro unicamente se la mucosa è sufficientemente idratata. LONTAX PLUS forma un film protettivo idratante sulla mucosa nasale. Questo film liquido costituisce una barriera fisica contro gli agenti esterni. L'idratazione prolungata può proteggere dal raffreddore e dalle sindromi simil-influenzali causate dai virus del raffreddore.

Il naso è la via di infezione più frequente per i virus responsabili del raffreddore e delle sindromi simil-influenzali. Le sindromi simil-influenzali sono causate da virus, tra cui rhinovirus e coronavirus. Quando i virus penetrano nel naso, possono colonizzare la mucosa e infettarne le cellule, moltiplicandosi e diffondendosi. Questo causa i sintomi tipici del raffreddore, come naso chiuso o naso che cola, mal di gola e/o mal di testa, tosse, ecc.

Nelle fasi iniziali della malattia, spesso, non è possibile distinguere con certezza il raffreddore dall'influenza. L'influenza è una malattia potenzialmente grave, per la cui diagnosi definitiva è necessario l'intervento di un medico.

LONTAX PLUS contiene Carragelose®, una sostanza di origine marina, ottenuta dalle alghe rosse. Carragelose® ha un duplice effetto positivo.

- LONTAX PLUS forma una barriera protettiva contro i virus del raffreddore. Il raffreddore e le sindromi simil-influenzali sono causati da una notevole varietà di virus, tra cui rhinovirus e coronavirus. Carragelose® lega in modo aspecifico i virus del raffreddore e ne impedisce l'adesione alla mucosa, riducendo così la moltiplicazione e la diffusione dei virus che infettano le vie respiratorie. Analogamente ai virus del raffreddore, l'attività aspecifica di intrappolamento del virus di Carragelose® è stata evidenziata anche in test in vitro per SARS-CoV-2. Anche se LONTAX PLUS non è in grado di evitare del tutto un'infezione da SARS-CoV-2, può comunque ridurre decisamente il rischio di infezione e diffusione del virus.

- LONTAX PLUS forma un film protettivo idratante. Grazie all'azione di Carragelose®, il film permane più a lungo sulla mucosa nasale e funziona da barriera fisica contro gli agenti esterni. Il film, garantendo l'idratazione fisiologica delle mucose, aiuta le difese naturali dell'organismo a respingere i virus del raffreddore.

#### Indicazioni terapeutiche - A cosa serve LONTAX PLUS?

LONTAX PLUS è in grado di ridurre la durata delle sindromi simil-influenzali e di mitigare la gravità dei sintomi del raffreddore. LONTAX PLUS è in grado di ridurre l'insorgenza di nuove infezioni e le riacutizzazioni dei sintomi del raffreddore di origine virale. LONTAX PLUS è indicato per la profilassi e il trattamento di supporto delle infezioni virali del tratto respiratorio.

LONTAX PLUS può anche essere usato a scopo preventivo per idratare in modo prolungato le mucose nasali e, quindi, come profilassi e trattamento di supporto per tutti i disturbi derivanti da una mucosa nasale secca e irritata.

#### Posologia e modo di somministrazione - Come e con quale frequenza si usa LONTAX PLUS?

Ai primi sintomi di infezione simil-influenzale (ad es. mal di gola, naso che prude o cola, ecc.) spruzzare almeno 3 volte al giorno per ciascuna narice. Iniziare il trattamento il prima possibile dopo l'insorgere dei primi sintomi simil-influenzali e continuare fino a quando i sintomi sono cessati. Se si sviluppa la febbre o non ci sono miglioramenti dopo 1 settimana di trattamento, consultare un medico.

Per idratare la mucosa nasale secca, applicare lo spray nel naso diverse volte al giorno in base alle necessità individuali.

- Rimuovere il cappuccio protettivo e, se necessario, azionare alcune volte la pompa fino ad ottenere una nebulizzazione uniforme. Ora LONTAX PLUS è pronto per l'uso.
- Per evitare lesioni, introdurre l'erogatore con cautela in ciascuna narice. Mantenere il flacone in posizione verticale durante l'applicazione.
- Dopo l'uso, applicare nuovamente il cappuccio protettivo sull'erogatore.

#### **Quando non si può usare LONTAX PLUS?**

In caso di ipersensibilità nota a uno dei componenti.

#### **Possibili effetti collaterali di LONTAX PLUS**

Ad oggi non sono noti effetti collaterali, eccetto rarissimi casi di ipersensibilità, come il sanguinamento del naso. Non vi sono interazioni note. Non sono stati condotti studi sulle interazioni con altri prodotti.

#### **Istruzioni specifiche per un uso sicuro**

LONTAX PLUS agisce a livello locale. Carragelose® non è assorbito dalle cellule della mucosa nasale.

LONTAX PLUS può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Se i sintomi persistono, consultare un medico. Qualsiasi incidente grave, che si verifichi in seguito all'uso di LONTAX PLUS deve essere comunicato al Fabbricante e all'autorità competente del suo paese

Per motivi igienici e per evitare la trasmissione di agenti patogeni, ogni flacone deve essere utilizzato sempre e solo dalla stessa persona.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

#### **Altre informazioni**

LONTAX PLUS può essere usato per un periodo di tempo prolungato. Non vi è alcun rischio di assuefazione o sovradosaggio.

LONTAX PLUS contiene la sostanza naturale Carragelose®.

LONTAX PLUS è un dispositivo medico clinicamente testato.

LONTAX PLUS non contiene antidolorifici, conservanti, componenti di origine animale o gas serra.

LONTAX PLUS è privo di lattosio e glutine e può essere utilizzato dai diabetici.

#### **Confezione**

Flacone da 30 ml con erogatore a spruzzo contenente 20 ml di soluzione; 1 spruzzo = 0,14 ml di soluzione (in totale 142 spruzzi).

#### **Periodo di validità**

36 mesi dalla data di produzione. Grazie allo speciale sistema filtrante, la soluzione rimane sterile anche dopo un uso ripetuto.

LONTAX PLUS può essere utilizzato fino alla data indicata sulla confezione.

#### **Istruzioni per la conservazione**

Conservare tra 5 °C e 30 °C.

Proteggere dalla luce.



#### **Fabbricante**

Hälsa Pharma GmbH  
Maria-Goepfert-Straße 5,  
23562 Lubecca  
Germania

#### **Distributore**

Fidia Farmaceutici S.p.A.  
Via Ponte della Fabbrica 3/A  
35031 Abano Terme (PD)  
Italia

STERILE A

CE 0482

Testo revisionato: Agosto 2020

NOT39701V02

